

## Fakta om Emil:


Emil blev født på Rigshospitalet 3 måneder for tidligt i 27. uge 1 minut efter sin tvillingsøster.

Blev straks efter fødsel overført til Neonetalafdelingen og lagt i kuvøse. Han udviklede sig efter forholdene fint, tog på i vægt og fik gang i afføringen.

5 uger efter fødslen begyndte en periode med kraftige infektioner og penicillinbehandlinger.

I løbet af 14 dage udvikledes synlige mavesmerter og dyk i respirationen. Der konstateredes akut NEC – Nekrotiserende enterocolitis – og hasteoperation var nødvendig.

Ud over anlæggelse af aflastende ileostomi (1), var det nødvendigt at fjerne to stykker af hhv. tynd- og tyktarmen (2). Den tværgående del af tyktarmen (3) – Transversum – blev bevaret i håb om at den kunne regenerere sig og senere blive funktionel. Den sidste del af tyktarmen før Rectum (4) blev snøret af.

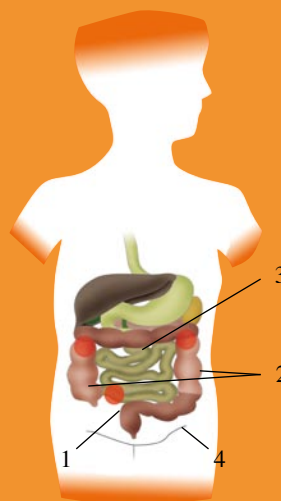

Ved den afsluttende operation konstateredes, at Transversum-delen (3) ikke kunne anvendes og blev derfor fjernet. Tyndtarmen blev ført direkte ned til de sidste 7-8 cm. tyktarm før Rectum.

Efter 1 måned er Emils afføring helt normal – såvel i farve som i konsistens.

Han har virkelig hentet igen på livet.

*Billederne i dette hæfte viser en helt normal skiftesituation i Emils hjem. Billedserien er optaget ca. 2 måneder efter anlæggelse af stomierne.*



HVAD HAR DU PÅ MAVEN, EMIL?

STOMIPLEJE TIL SPÆDBØRN

# STOMIPLEJE AF SPÆDBØRN



Klargør den nye pose i ro og fred. Ved hjælp af skabelonen lavet af stomisygeplejersken klipper du hullerne nøjagtigt til, så hudbeskyttelsespladen sidder tæt til roden af stomien.



For at smidiggøre hudbeskyttelsespladen, varmer du stomiposen op i bukselinningen. Det sikrer den bedste vedhæftning på huden – også i barnets mange folder i lysken.



Du kan skabe en god og afslappet atmosfære under stomiplejen, når der indledes med et bad. Og bare rolig. Posen falder ikke af i vandet!



Giver du dig god tid med aftagningen, vil barnet normalt ikke føle det generende.



Huden omkring stomierne vaskes med lunkent vand. Brug en blød bomuldsklud eller vat.



Det er vigtigt at vaske helt ind til stomien.



Det er en god ide at være to, når hudbeskyttelsespladen påsættes. Påsætningen lykkes bedst, når barnet ligger stille og så udstrakt som muligt. Start med at fastgøre hudbeskyttelsespladen umiddelbart rundt om stomien.



Vær omhyggelig med at påsætte hudbeskyttelsespladen – også hjørnerne, så du er sikker på, at den følger sig ned i hudfolder og lyske.



Bruger du en tømbar pose, vil den kunne sidde i op til 2-4 dage



## De hyppigste årsager til anlæggelse af tarmstomi:

### Nekrotiserende enterocolitis (NEC)

NEC skyldes en kombination af betændelse og dårlig blodforsyning i tarmen. Konstateres oftest hos for tidligt fødte børn.

### Hirschsprungs syndrom

Hirschsprung er medfødt og skyldes at tyktarmsvæggen mangler en bestemt type nerveceller, de såkaldte ganglier celler. Derved sker ophobning af afføring i tyktarmen.

### Analatresi

Analatresi er en medfødt misdannelse. Endetarmsåbningen mangler helt, er defekt eller sidder forkert.

### Ileus

Årsag til ileus-tarmslyng kan være

- afføringsprop
- tarmatresi (medfødt misdannelse i tarmen)

Misdannelsen kan sidde forskellige steder i tarmsystemet



Efter tørring begynder aftagning af den brugte pose.



Et stykke fugtigt vat presses let mod huden, så huden stille og roligt fjerner sig fra hudbeskyttelsespladen.



Det varme bad har smidiggjort den brugte hudbeskyttelsesplade, så den er let at fjerne fra huden.



Huden tørres grundigt med en blød klud.



Er der områder med let rødmen, kan irriteringer forebygges med påsmøring af f.eks. Dansac Skin Creme.



Når du har sikret dig, at huden er helt tør, kan den nye hudbeskyttelsesplade påsættes.



Er du grundig med stomiplejen vil dit barn normalt ikke føle sig besværet af stomiposen på maven, og er klar til at udforske den store verden.

## Tilbageførsel af stomi

I langt de fleste tilfælde kan stomien føres tilbage efter 2-6 måneder.



4 måneder efter 1. operation blev Emils stomi ført tilbage og tarmsystemet fungerer nu fuldstændig normalt. Eneste minde er arrene på maven.