



Ekstra beskyttelse

Dansac tilbehørsprodukter

dansac 

Indledning

Hos Dansac er vi dedikerede til at udvikle unikke stomiposer og -plader for at højne livskvaliteten for mennesker med stomi.

Sommetider kan huden dog have brug for ekstra hjælp eller bedre beskyttelse.

Ud over at levere stomibandager tager vi også hånd om disse særlige behov ved at tilbyde specielle plejeprodukter, der er lette at bruge, og som kan være med til at gøre hverdagen mere behagelig og sikker.

Denne pjece beskriver de forskellige tilbehørsprodukter, som Dansac tilbyder. Produkterne kan hjælpe mennesker med stomi, som oplever problemer med lækage, tør hud, irriteret hud, ubehagelig lugt osv.



Indhold



Dansac X-tra Strips, elastiske kantsikringer	4
Dansac Seal, formbar tætningsring	6
Dansac GX-tra Ringe	8
Dansac Soft Pasta	10
Dansac Adhesive Remover, klæbefjerner	12
Dansac Skin Protector, hudbeskyttelsesfilm	14
Dansac Skin Lotion.....	16
Dansac Skin Creme.....	18
Dansac Nodor S	20
Notater	22



DANSAC **X-TRA STRIPS**

Elastiske kantsikringer


Ekstra sikkerhed

Ekstra beskyttelse omkring klæberen – øget tryghed og sikkerhed

Dansac X-tra Strips er en hudvenlig og fleksibel mulighed for alle, der ønsker ekstra beskyttelse omkring klæberen. De elastiske kantsikringer er designet til at holde klæberens kant sikkert på plads og kan dermed være med til at øge sikkerheden og forlænge klæberens bæretid.

Den bløde og elastiske hydrokolloide formulering sikrer, at kantsikringen tilpasser sig hudens konturer og følger kroppens former og naturlige bevægelser.

Dansac X-tra Strips tredelte design sikrer, at kantsikringen passer til en hvilken som helst stomi-klæber.

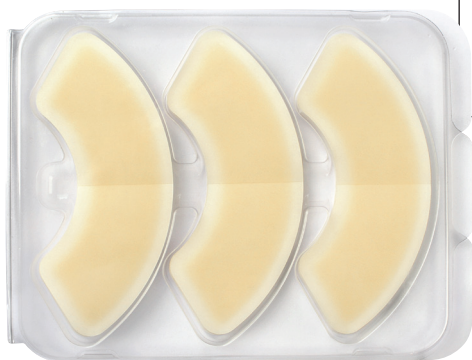

DANSAC X-TRA STRIPS

Elastiske kantsikringer

Tilbehør

	REF	Stk.
Kantsikringer	075 - 30	30



- Passer til en hvilken som helst stomiklæber
- Ekstra beskyttelse omkring klæberen
- Hudvenlig og fleksibel



DANSAC **SEAL**

Formbar tætningsring

Ekstra sikkerhed

Ekstra beskyttelse netop dér, hvor behovet er størst

Hudfolder, ar og retraktioner kan gøre det svært at opnå en god forsegling mellem huden og stomibandagen. Dansac formbar tætningsrings unikke design med det ikke-centrerede starthul er ideel til placering netop dér, hvor der er behov for ekstra beskyttelse. Dansac formbar tætningsring kan sættes direkte på huden eller på pladen og er let at fjerne igen uden at efterlade klæberester på huden.

Fleksibiliteten og faconen på tætningsringen, hvor klæbematerialet er ulige fordelt rundt om starthullet, gør det muligt at vende tætningsringen i den retning, hvor der er behov for ekstra beskyttelse. Med fire størrelser at vælge mellem og med mulighed for individuel tilpasning passer ringen til enhver stomi. Hvis du har behov for det, kan tætningsringen tilpasses og justeres igen og igen uden at gå i stykker eller miste klæbeevne.

Den 3 mm tykke ring består af et hudvenligt klæbemateriale med mikroskopiske fibre, som forstærker ringens holdbarhed. Dansac formbar tætningsring indeholder ikke alkohol og svier derfor ikke ved påsættelse.

Dansac formbar tætningsring er pakket individuelt i biologisk nedbrydelige etuier, som er nemme at bruge og praktiske at opbevare.



DANSAC SEAL
Formbar tætningsring

Tilbehør



Hulstørrelse	Ydermål	REF	Stk.
20 mm	45,0 mm	070 - 20	30
30 mm	57,5 mm	070 - 30	30
40 mm	70,0 mm	070 - 40	30
50 mm	82,5 mm	070 - 50	30



- Ekstra sikkerhed
- Ikke-centreret starthul for ekstra beskyttelse

Ekstra sikkerhed

Ekstra sikkerhed mod lækage

Dansac GX-tra Ringe reducerer risikoen for lækage og forlænger pladens bæretid.

Dansac GX-tra Ringe er ideelle til stomier i hudniveau eller tilbagetrukkede stomier for at opbygge området under pladen og beskytte huden mod aggressiv afføring. Ringen kan strækkes, så den passer omkring stomien eller kan klippes i mindre stykker for at udligne ujævnheder og rynker. Når overfladen er jævn, er det blot at sætte stomibandagen på som vanlig. Du kan også sætte ringen direkte på pladen.

Dansac GX-tra Ringe er fremstillet af et hudvenligt GX hydrocolloid materiale med bomuldsfibre. Bomuldsfibrene er med til at forlænge bæretiden ved at absorbere fugt og udsætte opløsningen af hydrocolloiden. Ringene indeholder ikke alkohol og er derfor ideelle til at beskytte irriteret hud og skabe et sikkert miljø for healing af huden.



DANSAC GX-TRA RINGE
Formbar tætningsring

Tilbehør



Ringstørrelse	REF	Stk.
20 mm	725 - 20/30	30
30 mm	725 - 30/30	30
40 mm	725 - 40/30	30
50 mm	725 - 50/30	30



- Sikkerhed mod lækage
- Forlænget bæretid

Ekstra sikkerhed

Udjævner hudfolder og ar

Det er ikke ualmindeligt at have hudfolder eller ujævnheder i huden omkring stomien. Disse forhold kan imidlertid gøre det vanskeligt at få pladen til at klæbe sikkert og tæt.

Dansac Soft Pasta er ideel til at udjævne hudfolder, ar og rynker, så stomibandagen sidder sikkert omkring stomien eller fistlen. Pastaen beskytter huden ved at reducere risikoen for, at output fra stomien løber ud under pladen. Pastaen forlænger også pladens bæretid.

Pastaen er let at smøre på tør hud eller direkte på pladen ved at anvende en fugtet finger eller spatel. Herefter kan pastaen modelleres og få en jævn overflade. Pastaen skal tørre i 30 sekunder, før du sætter pladen på, for at give alkoholen i pastaen tid til at fordampe.

Hvis der er behov for det, kan Dansac Soft Pasta bruges sammen med Dansac formbare tætningsringe.

Dansac Soft Pasta fås i tuber á 14,2 g og 50 g



 DANSAC SOFT PASTA

Tilbehør

Størrelse	REF
14,2 g	77514 - 2
50,0 g	77550 - 0



- Udjævner huden omkring stomien
- Beskytter huden



DANSAC ADHESIVE **REMOVER**

Klæbefjerner

Ekstra hudbeskyttelse

Hurtig og nem aftagning af stomibandage

Med Dansac klæbefjerner kan du nemt og smertefrit fjerne din stomibandage.

Dansac klæbefjerner er baseret på silikone og indeholder ikke alkohol og svier derfor ikke - heller ikke på øm hud. Den opløser hurtigt overskydende klæbermateriale og gør det nemt for dig at fjerne både stomipladen og eventuelle klæberester.

Dansac klæbefjerner fås både som spray og servietter.

Produkterne kan bruges hver for sig eller sammen: brug sprayen til at fjerne pladen med og fjern derefter eventuelle klæberester med en serviet. Servietterne er diskrete og praktiske at have med, når du er væk hjemmefra.



DANSAC ADHESIVE **REMOVER**

Klæbefjerner

Tilbehør

	REF	Indhold	Mål
Servietter	082 - 30	30 stk	115 x 195 mm
Spray	082 - 01	50 ml	



- Svier ikke (uden alkohol)
- Hurtig og nem aftagning af stomibandage
- Baseret på silikone
- Spray og servietter



DANSAC SKIN **PROTECTOR**

Hudbeskyttelsesfilm

Ekstra hudbeskyttelse

Beskytter huden omkring stomien

Effektiv beskyttelse af huden omkring stomien er afgørende for hudens sundhed. Dansac hudbeskyttelsesfilm er et godt valg, når du ønsker at beskytte huden mod skader.

Dansac hudbeskyttelsesfilm er en silikonebaseret, alkoholfri beskyttende film, der skånsomt beskytter huden mod irritation og skader forårsaget af stomipladens klæber og output fra stomien.

Dansac hudbeskyttelsesfilm fås som servietter, der ikke svier, og som er nemme at bruge. Servietterne er diskrete og praktiske at have med, når du er væk hjemmefra.



DANSAC SKIN PROTECTOR
Hudbeskyttelsesfilm

Tilbehør

	REF	Indhold	Mål
Servietter	081 - 30	30 stk	115 x 195 mm



- Svier ikke (uden alkohol)
- Forebygger irriteret og øm hud
- Baseret på silikone

Effektiv rengøring - uden vand

Rengøring af huden omkring stomien

Generelt anbefaler vi rent vand til rengøring af huden omkring stomien. Nogle gange har man imidlertid ikke adgang til rent vand - og nogle gange har huden brug for lidt ekstra pleje. Dansac Skin Lotion er en mild sæbe, som er ideel til rengøring af huden omkring stomien.

Påfør Dansac Skin Lotion på en blød klud og brug denne til at rense og dulme huden omkring stomien. Dup forsigtig huden tør, inden du sætter en ny stomibandage på.

Dansac Skin Lotion fås i flasker á 200 ml og som servietter.



 DANSAC SKIN LOTION

Tilbehør

	REF	Indhold	Mål
Flaske	70000 - 0000	200 ml	
Servietter	71000 - 0000	50 stk	140 x 190 mm



- Mild sæbe
- Effektiv rengøring af huden omkring stomien
- Uden vand

Ekstra fugt

Undgå tør og irriteret hud

Selv med de mest avancerede og hudvenlige stomiplader er det naturligt, at huden omkring stomien af og til kan blive tør og irriteret. Ved at smøre huden med Dansac Skin Creme før du sætter din stomibandage på, kan du undgå eventuelle hudirritationer og tør hud.

Cremen indeholder Aloe Vera og A, D og E vitamin og har en lindrende og fugtgivende virkning på huden. Da Dansac Skin Creme er fedtfri, påvirker den ikke pladens klæbeevne. Cremen er uden farve og duft.

Cremen trænger hurtigt ind i huden og efterlader den blød og smidig. Overskydende creme aftørres, inden du sætter din stomibandage på.

Dansac Skin Creme fås i flasker á 100 ml.





DANSAC SKIN CREME

Tilbehør

Indhold	REF
100 ml	085 - 00



- Lindrer og giver fugt til huden
- Forebygger hudirritation
- Indeolder Aloe Vera, A, D og E vitamin
- Fedtfri og uden farve/duft

Ekstra diskretion

Neutraliserer lugt

Ved at tilsætte et par dråber Dansac Nodor S i stomiposen, neutraliseres lugten fra afføring, så risikoen for ubehagelige lugte ved tømning eller skift af stomiposen minimeres.

Dansac Nodor S er et sikkert og uskadeligt produkt, som indeholder vand og en opløsning af aluminium og zinksalte. Produktet virker ved at absorbere lugt gennem saltmolekylerne og har ingen duft i sig selv.

Kom et par dråber Dansac Nodor S i posen. Afhænging af fordøjelse og kost kan det være nødvendigt med et par ekstra dråber for at sikre optimal effekt.

Dansac Nodor S fås i to størrelser - 50 ml flasken er let at tage med, mens 250 ml flasken er til brug derhjemme.



 DANSAC NODOR S

Tilbehør

Indhold	REF
50 ml	080 - 00
250 ml	080 - 01



- Undgå ubehagelig lugt
- Indeholder vand, aluminium og zinksalte



Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

[illegible]

Dansac Tilbehør

Sommetider har huden brug for ekstra hjælp eller bedre beskyttelse. Dansac tilbyder en bred vifte af tilbehørsprodukter, som hjælper dig med at passe på din hud:

Dansac X-tra Strips, elastiske kantsikringer

Ekstra beskyttelse omkring klæberen

Dansac Seal, formbar tætningsring

Ekstra beskyttelse netop dér, hvor behovet er størst

Dansac GX-tra Ringe

Ekstra sikkerhed mod lækage

Dansac Soft Pasta

Udjævner hudfolder og ar

Dansac Adhesive Remover, klæbefjerner

Hurtig og nem aftagning af stomibandage

Dansac Skin Protector, hudbeskyttelsesfilm

Beskytter huden omkring stomien

Dansac Skin Lotion

Rengøring af huden omkring stomien

Dansac Skin Creme

Tilfører huden fugt

Dansac Nodor S

Neutraliserer lugt

P02-60-100 08/16 © Dansac